

WOFASEPT FL SPRÜHDESINFEKTION

Gebrauchsfertiges Flächendesinfektionsmittel

geruchsneutrale
Desinfektion



Die KESLA PHARMA WOLFEN GMBH ist gemäß DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

KESLA PHARMA WOLFEN GMBH

Keslastraße 1
06803 Bitterfeld-Wolfen
Tel.: +49 (0) 3494 - 6995 0
Fax: +49 (0) 3494 - 6995 29
www.kesla.de
info@kesla.de

Es kann keine Gewähr für die Allgemeingültigkeit der Angaben in dieser Produktinformation übernommen werden. Alle Angaben geben unseren Erfahrungsstand wieder; eine allgemeine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Letzte Überarbeitung: 06.13



WOFASEPT FL SPRÜHDESENFECTIO

Gebrauchsfertiges Flächendesinfektionsmittel

Anwendungsgebiete:

Für die geruchsneutrale Desinfektion von abwaschbaren Oberflächen im Arbeitsbereich von Arztpraxen, Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen sowie Laboren, Lebensmittel- und Gastronomiebereichen sowie zur Bekämpfung von Pilzen auf rohem Holz.

Listungen:

Basiert auf dem Präparat Wofasept FL-Konzentrat, das gemäß den Richtlinien des VAH und der DVG geprüft und zertifiziert ist.

Eigenschaften:



Breitbandiges Mikrobizid

Wofasept FL Sprühdeseinfektion ist wirksam gegen Bakterien, Pilze, lipophile Viren (einschließlich HBV / HIV) und humane Rotaviren.



Ohne Eiweißfehler

Unempfindlich gegen Verunreinigungen wie Blut, Eiweiß, Stuhl, Sputum, Eiter u.a.




Keine Gefahr von Allergien

Wofasept FL Sprühdeseinfektion ist Chlor-, aldehyd- und phenolfrei und enthält somit enthält keine Stoffe von denen ein allergenes Potential ausgeht.

Anwendung und Dosierung:

Unverdünnt aufsprühen, wischend verteilen und ggf. nach der Einwirkzeit mit einem trockenen Tuch nachwischen.

	Einwirkzeit
• zur Flächendesinfektion in Krankenhaus, Praxis sowie anderen medizinischen Einrichtungen • gegen Hepatitis B und C und HIV • gegen Herpesviren • gegen Norovirus • gegen Influenza A Virus	1 min 1 min 15 min 30 min 1 min
Für die Desinfektion von Solarien und abwaschbaren Oberflächen	1 min
Für den Lebensmittelbereich	30 min
Für die Bekämpfung von Pilzen auf rohem Holz	60 min

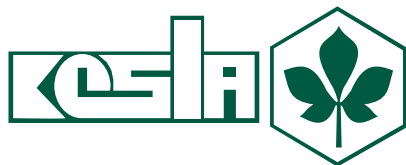

WOFASEPT FL SPRÜHDESINFEKTION

Gebrauchsfertiges Flächendesinfektionsmittel



Zusammensetzung:

100 ml Wofasept FL Sprühdeseinfektion enthalten:
0,75 % quartäre Ammoniumverbindungen in wässriger Lösung.

Aussehen:

Klare, farblose bis gelbliche Flüssigkeit.

Wechselwirkung:

Kombinierte Anwendung von Wofasept FL Sprühdeseinfektion mit anderen Desinfektions- oder Reinigungsmitteln unterlassen, da diese die Wirkung durch chemische Interaktion aufheben können. Nach dem Einsatz von anionischen Reinigungsmitteln ist vor der Desinfektion eine gründliche Spülung mit Wasser zu empfehlen.

Materialverträglichkeit:

Bei der Anwendung an empfindlichen Oberflächen und Materialien wird eine Vorprobe mit der vorgesehenen Konzentration und Einwirkzeit an einer unauffälligen Stelle empfohlen.

Gefahrenhinweise:

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:

P264	Nach Gebrauch Haut gründlich waschen.
P280	Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P337 + P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Kinderspielzeug nach der Desinfektion mit Wasser abspülen.

Lagerung:

Bei Raumtemperatur in geschlossenen Originalgebinden vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit geschützt an einem gut belüfteten Ort lagern.

Entsorgung:

Kleine Mengen mit viel Wasser verdünnt dem Abwasser zugeben.
Größere Mengen sind gemäß örtlicher behördlicher Vorschriften über ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen zu entsorgen.

Haltbarkeit:

5 Jahre

Biozid-Registriernummer:

BAuA-Reg.-Nr.:
N-22126 (Biozid-Produkt für den Privatbereich und den Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens)
N-22127 (Produktart 4 - Biozid-Produkt für den Lebens- und Futtermittelbereich)

UBA 25341004

Liefergebinde:

500 ml Sprühflasche	Karton mit 12 Flaschen	PZN: 6878235
5 l Kanister	Karton mit 3 Kanistern	PZN: 6878229

Kleine Flächen, die oft nur schwer zugänglich sind werden in ihrer Bedeutung als Infektionsquellen häufig unterschätzt. Hier bietet sich die Sprühdeseinfektion bei richtigem Einsatz als ein sinnvoller Ersatz oder Ergänzung zur Wischdesinfektion an.



WOFASEPT FL SPRÜHDESINFEKTION

Gebrauchsfertiges Flächendesinfektionsmittel

Unsere Hygienefachberater in Ihrer Nähe

