



WOFASEPT

**Desinfektionskonzentrat mit Reinigungswirkung
zur Instrumentendesinfektion und zur Flächendesinfektion**



**jahrzehntelang
bewährt**



Die KESLA PHARMA WOLFEN GMBH ist
gemäß DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

KESLA PHARMA WOLFEN GMBH

Keslastraße 1
06803 Bitterfeld-Wolfen
Tel.: +49 (0) 3494 - 6995 0
Fax: +49 (0) 3494 - 6995 29
www.kesla.de
info@kesla.de

Es kann keine Gewähr für die Allgemeingültigkeit der Angaben in dieser Produktinformation übernommen werden. Alle Angaben geben unseren Erfahrungsstand wieder; eine allgemeine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Letzte Überarbeitung: 01.17



WOFASEPT

Desinfektionskonzentrat mit Reinigungswirkung zur Instrumentendesinfektion und zur Flächendesinfektion

Anwendungsgebiete:

Desinfektion aller abwaschbaren Flächen in Klinik, Arztpraxis, Kommunal- und Haushalts-hygiene u.a. Desinfektion von Instrumenten nach Medizinprodukterichtlinie und belasteter Wäsche beim Einweichen. Reinigt, desinfiziert und desodoriert in einem Gang. Besonders geeignet für die reinigende Desinfektion von Flächen u.ä. auch bei hoher Eiweißbelastung. Gelistet zur Flächendesinfektion nach VAH.

Eigenschaften:

Listungen:



Breitbandiges Mikrobizid

Wofasept ist wirksam gegen alle Bakterien (außer Mykobakterien und Sporenbildner) und Pilze (Hefen).



Ohne Eiweißfehler

Unempfindlich gegen Verunreinigungen wie Blut, Eiweiß, Stuhl, Sputum, Eiter u.a.



Keine Resistenzbildung

Aufgrund des Wirkungsmechanismus können Resistenzen ausgeschlossen werden.

Anwendung und Dosierung:

Desinfektion im Bereich Krankenhaus, ärztlicher Praxis und in öffentlichen Bereichen entsprechend der Desinfektionsmittelliste des VAH.

	Konzentrationen	Einwirkzeit
Flächendesinfektion bei hoher organischer Belastung in Krankenhaus und Praxis (VAH – Bakterizidie und Levurozidie)	2 % *	30 min
Instrumentendesinfektion in Krankenhaus und Praxis	2 %	15 min
Bei geringem Infektionsrisiko, Haushalt u.a.	1 % 2 %	60 min 30 min
Wäschedesinfektion (Einweichen)	1 % 2 %	4 h 1 h
begrenzt viruzid wirksam (Schweinegrippe, Vogelgrippe)	2,5%	5 min

* 2 ml Wofasept auf 98 ml Wasser

20 ml Wofasept auf 9,8 l Wasser

Wofasept

- Instrumentendesinfektion -

Reinigende Desinfektion zur schnellen und schonenden Aufbereitung von chirurgischem und zahnärztlichem Instrumentarium und anderen Laborgeräten.

Nach der Einwirkzeit erfolgt das Abspülen und Trocknen der Instrumente.



Nach Europäischer Medizinprodukterichtlinie (93/42/EWG) zertifiziert.





PRODUKTINFORMATION

WOFASEPT

**Desinfektionskonzentrat mit Reinigungswirkung
zur Instrumentendesinfektion und zur Flächendesinfektion**



Zusammensetzung:

100 ml Wofasept enthalten:
5,0 g Chlorocresol, 2,0 g Clorofen sowie 5 - 15 % anionische Tenside, wasserlösliche Lösemittel, Duft- und Hilfsstoffe.

Aussehen:

Klare, bräunlich-gelbliche Flüssigkeit mit spezifischem Geruch.

Wechselwirkung:

Kombinierte Anwendung von Wofasept mit anderen Desinfektions- oder Reinigungsmitteln unterlassen, da diese die Wirkung durch chemische Interaktion aufheben können.

Materialverträglichkeit:

Bei der Anwendung an empfindlichen Oberflächen und Materialien wird eine Vorprobe mit der vorgesehenen Konzentration und Einwirkzeit an einer unauffälligen Stelle empfohlen.

Gegenanzeigen:

Nicht zur Desinfektion von Gegenständen und Anlagen zur Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln geeignet.

Gefahrenhinweise:

H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H411	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P261	Einatmen von Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
P264	Nach Gebrauch Haut gründlich waschen.
P272	Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280	Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P308+P311	BEI EXPOSITION oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P362	Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P302+P352	BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P391	Verschüttete Mengen aufnehmen.

Lagerung:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Raumtemperatur in geschlossenen Originalgebinden vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt lagern.

Entsorgung:

P501 Inhalt / Behälter einem zugelassenen Entsorgungsunternehmen zuführen.

Kleine Mengen mit viel Wasser verdünnt dem Abwasser zugeben. Größere Mengen sind gemäß örtlicher behördlicher Vorschriften über ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen zu entsorgen.

Haltbarkeit:

5 Jahre

Biozid-Registriernummer:

BAuA-Reg.-Nr.:
N-15580 (Produktart 2 - Desinfektionsmittel für den Privatbereich und den Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens)

UBA 25341001

Liefergebinde:

250 ml	Flasche	Karton mit 12 Flaschen	PZN: 04669119
1 l	Flasche	Karton mit 10 Flaschen	PZN: 12202708
5 l	Kanister	Karton mit 3 Kanistern	PZN: 11608070
10 l	Kanister		PZN: 11608087
25 kg	Kanister		PZN: 11608093

Wir empfehlen die Ausbringung mit unserem Handsprühergerät 1 l.
Es ist ideal zur Ausbringung von Desinfektionsmittellösungen bei kleinen und mittleren Flächen geeignet.





WOFASEPT

**Desinfektionskonzentrat mit Reinigungswirkung
zur Instrumentendesinfektion und zur Flächendesinfektion**

Unsere Hygienefachberater in Ihrer Nähe

