



## **Gebrauchsanweisung für kombinierten Bett- und Beinbeutel steril**

**Gültig für: KBB1000-30s, KBB1000-60s, KBB1000-90s**

**Versionsnr.: KBB1000s.07.17 Freigabedatum: 08.2017**

**Revisionsnr.: 02**

### **Beschreibung:**

Der Urinbeutel ist erhältlich in der Größe 1000ml. Er besteht aus PVC-Folie medizinischer Qualität und wird mit einem knickfesten PVC-Schlauch sowie Rückschlagventil gefertigt. Er setzt sich zusammen aus einem Urinbeutel mit Abflussfunktion und einer Steuereinheit (Einlass und Ablassrohr sowie Abflussventil). Der Schlauch des Urinbeutels enthält einen selbstverschließenden Zugang, der es erlaubt, frischen Urin mit einem Entnahmegesäß zu sammeln.

Es handelt sich um ein medizinisches Produkt der Klasse I steril und ist nur für den Einmalgebrauch bestimmt.

### **Indikation:**

Das Produkt dient dem Auffangen und Sammeln von Urin, der durch den Katheter abgeleitet wird sowie der Ableitung des aufgefangenen Urins. Es ist besonders für Patienten mit Behinderung sowie bewegungsunfähige und bettlägerige Patienten geeignet.

**Kontraindikation:** Nein

**Nebenwirkungen:** Keine

### **Messfunktion:**

Keine. Die Messanzeige dient dem medizinischen Personal als Schätzhilfe, ist für eine genaue Messung aber ungeeignet. Hierfür bitte geeignete Messbecher nutzen.

### **Gebrauchsanweisung:**

- Waschen Sie die Hände immer vor und nach dem Leeren des Beutels.
- Hängen Sie den Beutel in Höhe oder unterhalb der Blase auf.
- Schließen Sie das Ablassventil, bevor Sie den Beutel mit dem Katheter oder einem anderen Medizinprodukt verbinden. Das Austauschen des Urinbeutels erfolgt nach Ermessen des medizinischen Fachpersonals.
- Überwachen Sie das System in regelmäßigen zeitlichen Abständen um sicherzugehen, dass der Urin frei fließt.
- Sobald der maximale Füllstand des Beutels erreicht ist, öffnen Sie das Ablassventil und entleeren Sie den Inhalt in einen geeigneten Sammelbehälter.
- Danach schließen und reinigen Sie das Ablassventil. Nutzen Sie zur Reinigung ein Desinfektionstuch und entfernen Sie mit dessen Hilfe alle Rückstände am Ablassventil.
- Zur Entnahme frischen Urins ein geeignetes Entnahmegesäß durch die Öffnung im Schlauch einführen, während der Patient uriniert.

### **Sicherheitshinweise:**

- Nur für den Einzelgebrauch. Nach der Nutzung im Müll entsorgen. Das Produkt darf nicht wiederverwendet oder resterilisiert werden. Eine Wiederverwendung birgt das Risiko von Infektionen und kann die Leistung des Produktes beeinträchtigen und bis hin zum Funktionsausfall führen.
- Dieses Produkt sollte nur unter der Leitung von medizinischem Personal, welches fachgerechtes Training erhalten hat, verwendet werden.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Während des Gebrauchs muss der Beutel aufrecht hängen, im Schlauch dürfen keine Schleifen und Knicke vorhanden sein.
- Nicht in direktem Sonnenlicht, bei extremen Temperaturen oder bei hoher Feuchtigkeit lagern.

# FORLIFE

BERLIN

## Bedeutung der Symbole auf der Verpackung



Sterilisiert mit Ethylenoxid



Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft



Latexfrei



Enthält oder Anwesenheit von Phthalaten



Nicht erneut sterilisieren



Nicht wiederverwenden



Hersteller



Herstellungsdatum (Datumsformat JJJJ-MM)



Verwendbar bis (Datumsformat JJJJ-MM)



Benannte Stelle TÜV Rheinland



Artikelnummer



Chargencode



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden



Achtung



Trocken aufbewahren



Von Sonnenlicht fernhalten



Temperaturbegrenzung



Gebrauchsanweisung beachten

### Vertrieb durch/Distribution by:

For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH  
Wendenschloßstraße 142, D-12557 Berlin

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.  
Unit 93, Building 12, No. 818, Qiming Road, Yinzhou 315105 Ningbo, Zhejiang, China

Greatcare Medical GmbH  
Bonner Str. 31, 50389 Wesseling, Germany

17411 2017-08 2022-07

Made in China

Schlauchlänge: **30 & 60 & 90 CM**



### Contains Phthalates:

There are no known residual risks for Children, pregnant or nursing women.



**PZN 12465709, 12465715, 12465721**

**REF KBB1000-30s, 60s, 90s**